
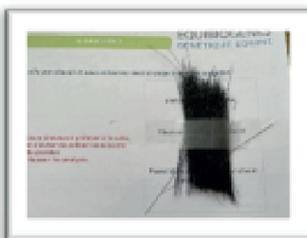


KIT DE PRÉLÈVEMENT

PRÉLÈVEMENT CRINS

Si vous prélevez les crins de plusieurs chevaux à la suite, bien se nettoyer les mains afin d'éviter de polluer les suivants avec des poils du premier. Un seul poil peut suffire pour fausser les analyses.

Tutoriel :

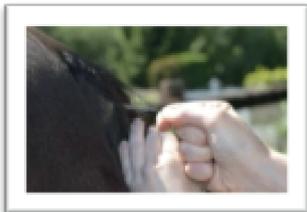

Avant l'arrachage, il est nécessaire de s'assurer de la propreté des crins afin d'éviter tout contaminant extérieur. Préférer l'arrachage manuel à l'utilisation du peigne qui peut être source de contamination.

Les crins peuvent être prélevés soit au niveau de la crinière du cheval, soit situés au niveau de la crinière ou à la base de la queue, où ils sont souvent plus simples à arracher. ***Surtout, ne coupez pas les crins !***

Prélevez au minimum une trentaine de crins en tirant doucement. Vérifiez la présence des bulbes pilifères (follicule pileux), partie du crin dans laquelle se situent les cellules qui portent l'information génétique.

Fixez les crins dans l'emplacement prévu à cet effet ci-dessus ou placez les dans un sachet.

partie du crin avec bulbe

fixez votre bande adhésive ici

posez les crins ici, bulbe vers le haut. environ 30 crins.

PRÉLÈVEMENT SANG

Tutoriel :

Prélevez 4mL de sang dans un tube EDTA violet.

Identifiez bien le tube avec le nom ou le N° SIRE du cheval.

Envoyez par courrier via enveloppe à bulle avec le bon ci-joint.

